

車いす


車いすを使用することで、外出や長い距離の移動を快適にするとともに、介助者の負担も軽減することができます。

利用者状態別選定ポイント

車いすは、屋内で使用する場合と屋外で使用する場合とでは、使用される時間や環境が異なるため、選択するポイントが変わってきます。ご使用者の身体状況や介護環境と合わせて、慎重に選定する必要があります。


このマークを目安に選べます

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

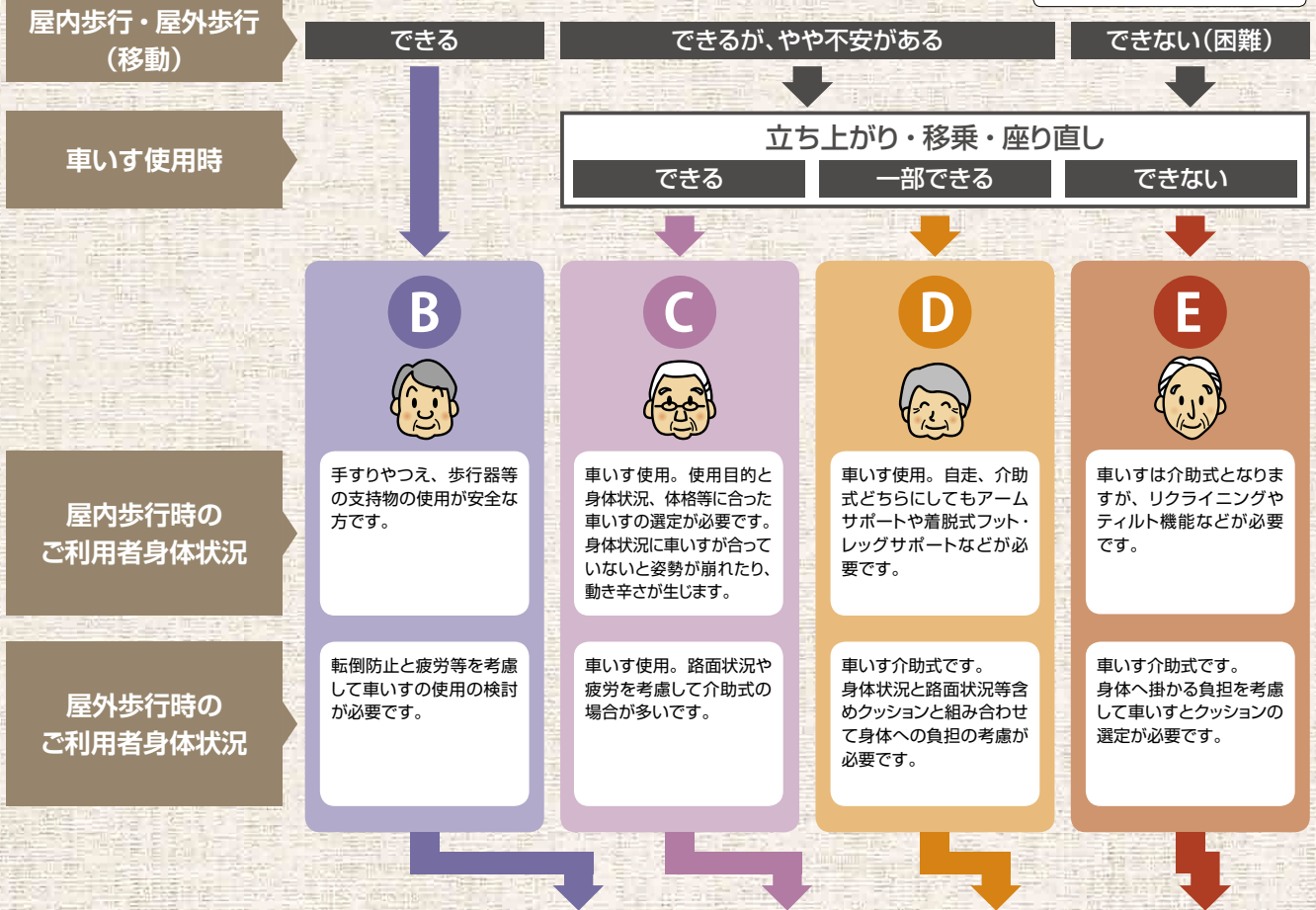

	車いすの種類	車いすのイラスト	選定ポイント					
			屋内	屋外	できる	一部できる	できない	
手動車いす	自走式 参照 P.40 ご本人が操作して駆動させるタイプ		屋内			○	○	
			屋外	○		○	○	
	介助式 参照 P.44 介助者が押して駆動させるタイプ		屋内	○		○	○	
			屋外	○		○		
	リクライニング式 ティルト式 参照 P.48 リクライニング/ティルト機能付き		屋内				○	○
			屋外				○	○
電動車いす	電動 参照 P.50 操作レバーによる駆動/介助者による操作が可能なタイプも		屋内			○		
			屋外	○		○	○	
	電動カート 参照 P.50 ハンドル操作で駆動 歩行者扱い		屋内					
			屋外	○				

車いすの名称と機能

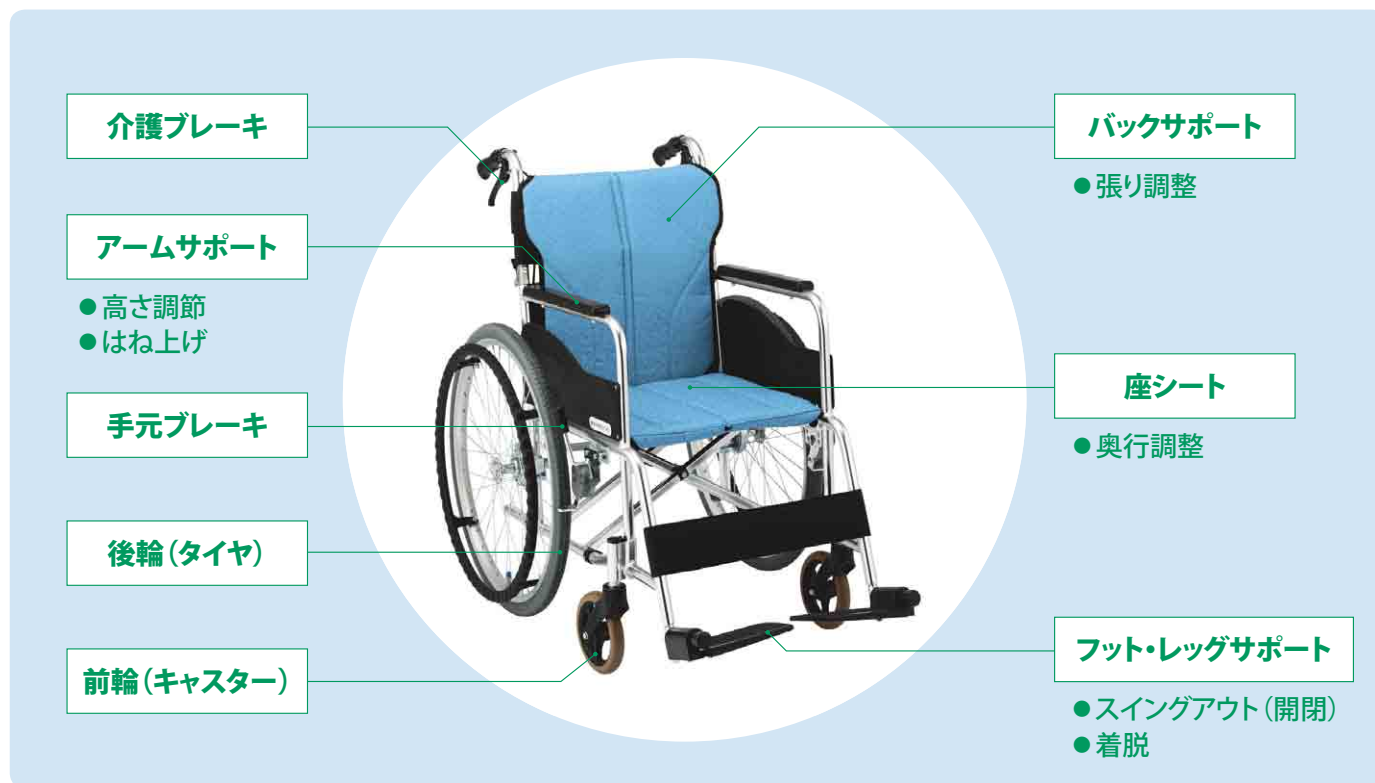

車いすシーティングについて


利用者様の身体サイズ・身体機能・使用方法・環境などに車いすのサイズ・機能を適合させる(他の福祉用具やクッションなどを併用する場合があります)ことを車いすシーティングといいます。

車いすシーティングには一定の知識・技術が必要ですので、専門家にご相談ください。

身体寸法と車いす寸法の合わせ方の目安


a 座シート幅	① 座位臀幅に0~3cmを足します。
b 座シート奥行	② 座底長から5~7cm引きます。
c アームサポート高さ	③ 座位肘頭高に1~2cm足します(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。
d フット・レッグサポート長さ	④ 座位下腿長(必要に応じてクッションの厚さを引きます)に合わせます。
e バックサポート高さ	⑤ 座位腋下高から7~10cm引きます(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。
f 前座高	④ 座位下腿長に2~5cm足します(必要に応じてクッションの厚さを引きます)。
g グリップ高さ	介護者のへそ~股関節の高さに合わせます。

車いす寸法

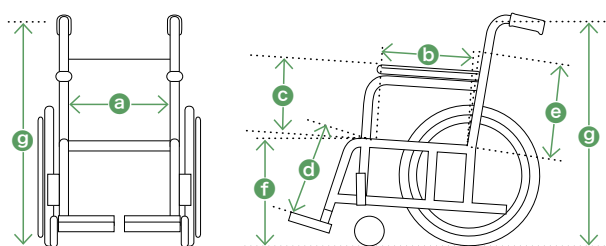

- a 座シート幅
- b 座シート奥行
- c アームサポート高さ
- d フット・レッグサポート長さ
- e バックサポート高さ
- f 前座高
- g グリップ高さ

身体寸法

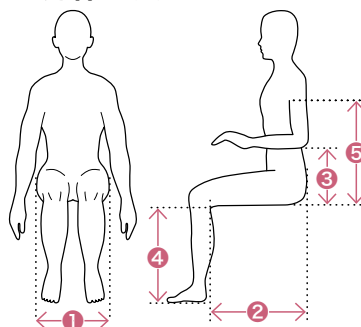

- ① 座位臀幅(ざいでんぷく)
臀部の一番広い幅
- ② 座底長(ざいでいちよう)
臀部後端から膝裏までの長さ
- ③ 座位肘頭高(ざいちゆうとうこう)
座面から肘までの高さ
- ④ 座位下腿長(ざいかたいちよう)
足の裏から膝裏までの高さ
- ⑤ 座位腋下高(ざいえきかこう)
座面から腋の下までの高さ

標準タイプ

KK-T540 自走式

パラマウントベッド


シートカラーが選べる
車いすのスタンダード!



屋内	A B C D E	屋内	A B C D E
屋外	A B C D E	屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整



ブルー

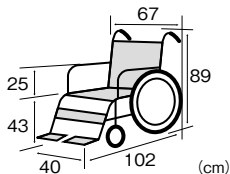

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：35cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	3,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	300 円/月
ご利用負担額 (2割)	600 円/月

非課税

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	67 cm	43 cm	15.7 kg

色	型式	商品コード	TAISコード
ブルー	KK-T540MA	726680	00170-000624

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガード受け金具、ポンペ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

標準タイプ

BAL-1 自走式

ミキ


ノーパンクタイヤの
スタンダード車いす



屋内	A B C D E	屋内	A B C D E
屋外	A B C D E	屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整



ノーパンク
タイヤ

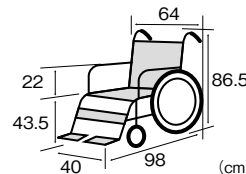

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：33.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	64 cm	43.5 cm	12.9 kg

商品コード	TAISコード
726695	00122-000451

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

レンタル価格	2,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	200 円/月
ご利用負担額 (2割)	400 円/月

非課税

幅狭タイプ


SKT-4 自走式

ミキ

人気のスキットに自走用登場
狭い室内もスイスイ移動でき、
ちょっとしたスペースにも
収納できます



屋内	A B C D E	屋内	A B C D E
屋外	A B C D E	屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整

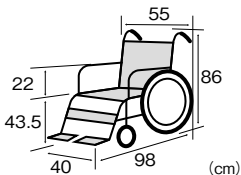

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：28.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	5,500 円/月
ご利用負担額 (1割)	550 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,100 円/月

非課税

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	55 cm	43.5 cm	13.7 kg

商品コード	TAISコード
726650	00122-000411

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

軽量タイプ


エアリアル MW-SL1 自走式

松永製作所

持ち運びが楽な
アルミ製超軽量タイプ



屋内	A B C D E	屋内	A B C D E
屋外	A B C D E	屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整

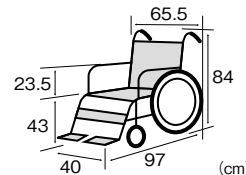

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：35cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	65.5 cm	43 cm	11 kg

商品コード	TAISコード
726530	00066-000182

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガード受け金具、延長棒

レンタル価格	5,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	500 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,000 円/月

非課税

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

購入品(排泄)

購入品(入浴)

幅狭タイプ

モック MOC-43LTP


自走式

ミニ

軽量かつコンパクトな車いす

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

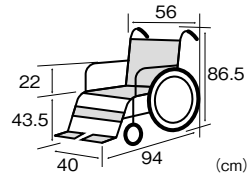

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg



座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	43.5 cm	11.2 kg

レンタル価格	5,500 円/月
ご利用負担額 (1割)	550 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,100 円/月

商品コード TAISコード
726135 00122-000360

非課税

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

軽量タイプ/幅狭タイプ

NEXT CORE (自走) NEXT-11B

自走式


松永製作所

次世代の標準型車椅子



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

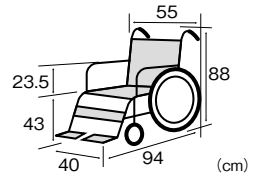

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：29cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	55 cm	43 cm	11.8 kg

レンタル価格	4,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	400 円/月
ご利用負担額 (2割)	800 円/月

商品コード TAISコード
726725 00066-000315

非課税

●オプション…後方ガードル受け金具、杖入れ、延長棒

標準タイプ

AR-500


自走式

松永製作所

耐荷重 100kg
移乗も楽な多機能型

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

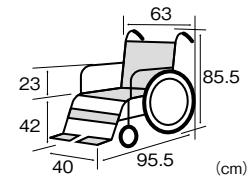

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	63 cm	42 cm	16.6 kg

レンタル価格	5,500 円/月
ご利用負担額 (1割)	550 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,100 円/月

商品コード TAISコード
726050 00066-000186

非課税

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、後方ガードル受け金具、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

軽量タイプ

軽8W NA-L8W (自走)


自走式

日進医療器

とにかく超軽量
安全移乗の
スイングアウト・ハネアゲ付

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

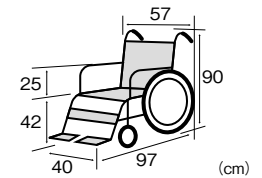

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：31cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg



座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	57 cm	42 cm	12 kg

レンタル価格	7,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	700 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,400 円/月

商品コード TAISコード
726720 00175-000273

非課税

自走式

各種オプションは51ページをご覧ください。

車いす


標準タイプ

WAVIT+ WAP22-40S 自走式 カワムラサイクル

前ズレしにくい独自の曲線フレーム
～つまむレバーから握るレバーへ～

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

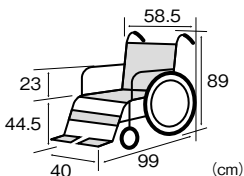

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーバンク
タイヤ

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	58.5 cm	44.5 cm	14.2 kg

商品コード TAISコード
726740 00160-000242

●オプション…WAVIT用延長プレーキ

レンタル価格	5,500 円/月
ご利用負担額 (1割)	550 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,100 円/月

非課税


幅広タイプ

KJP-4 自走式 ミキ

体重の重い方用ビッグサイズ車いす
身体が大きい方に最適な130kg対応

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

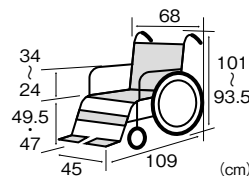

- 前輪：8インチ
- 後輪：24インチ
- 折りたたみ幅：38cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：130kg

ノーバンク
タイヤ

座幅	全幅	前座高	重量
45 cm	68 cm	47-49.5 cm	20.2 kg

商品コード TAISコード
726137 00122-000345

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

レンタル価格	6,500 円/月
ご利用負担額 (1割)	650 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,300 円/月

非課税


低床タイプ

エアリアル MW-SL5 自走式 松永製作所

足こぎやクッション併用可の
超低床・軽量

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

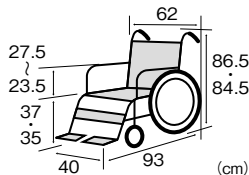

- 前輪：5インチ
- 後輪：20インチ
- 折りたたみ幅：38cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	62 cm	35-37 cm	12.6 kg

商品コード TAISコード
726550 00066-000237

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、延長棒

レンタル価格	6,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	600 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,200 円/月

非課税


低床タイプ

エアリアル MW-SL5BT 自走式 松永製作所

自動ブレーキシステム
「立ち止まり君」付低床車いす

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

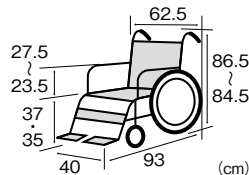

- 前輪：5インチ
- 後輪：20インチ
- 折りたたみ幅：38.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

※この機能は駐車ブレーキの補助をするものであり代替するものではありません。
※ご利用者様の体重や座る姿勢によっては自動ロックが解除されないケースがございます。

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	62.5 cm	35-37 cm	16.1 kg

商品コード TAISコード
726555 MATSUNAGAS-MW-SL5BT

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、延長棒

レンタル価格	6,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	600 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,200 円/月

非課税

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動遊理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

購入品(排泄)

購入品(入浴)

簡易モジュールタイプ

NA-3DX (自走)


自走式

日進医療器

多彩な調整機能
拭き取りやすい
ウレタンレザーシートも人気です



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

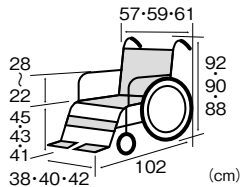

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：36cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅(固定)	全幅	前座高	重量
38-40-42 cm	57-59-61 cm	41-43-45 cm	15.8 kg

座幅	商品コード	TAISコード
38cm幅	726331	00175-000279
40cm幅	726330	00175-000279
42cm幅	726332	00175-000279

レンタル価格	6,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	600 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,200 円/月

●オプション…延長棒

非課税

簡易モジュールタイプ

ネクストコア・アジャスト NEXT-51B (自走)


自走式

松永製作所

肘掛・座面・
フットサポート調整機能で
姿勢をサポートする
モジュールタイプ



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

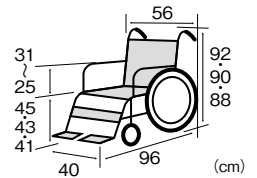

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	55 cm	41-43-45 cm	14.6 kg

商品コード	TAISコード
726755	00066-000320

レンタル価格	5,500 円/月
ご利用負担額 (1割)	550 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,100 円/月

●オプション…後方ガートル受け金具、杖入れ、延長棒

非課税

6輪車タイプ

タイトターン TT-01 (自走)


自走式

松永製作所

室内用6輪で足こぎに適した
開き式フット・レッグサポート付



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

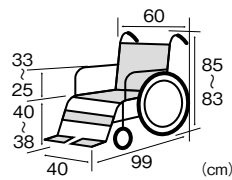

- 前輪：4インチ
- 後輪：20インチ
- 折りたたみ幅：32.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	60 cm	38~40 cm	16.9 kg

商品コード	TAISコード
726240	00066-000154

レンタル価格	6,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	600 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,200 円/月

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、延長棒

非課税

モジュールタイプ

EX-M3 (自走)


自走式

日進医療器

幅広い寸法に対応可能
自分だけのぴったり寸法の
車いすを!



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

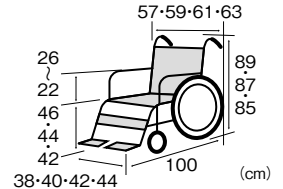

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：37cm
- シート奥行：35・40cm
- 最大使用者体重：100kg

※EX-Mもご用意しております。

座幅(調整)	全幅	前座高	重量
38-40-42-44 cm	57-59-61-63 cm	42-44-46 cm	15.8 kg

商品コード	TAISコード
726212	00175-000277

レンタル価格	8,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	800 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,600 円/月

●オプション…延長棒

非課税

標準タイプ

KK-T545 介助式 パラマウントベッド


シートカラーが選べる
車いすのスタンダード!



屋内	A B C D E	屋内	A B C D E
屋外	A B C D E	屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整



ブルー

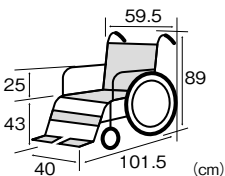

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：30cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	3,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	300 円/月
ご利用負担額 (2割)	600 円/月

非課税

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	59.5 cm	43 cm	14.3 kg

色	型式	商品コード	TAISコード
ブルー	KK-T545MA	728445	00170-000644

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガード受け金具、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

標準タイプ

BAL-2 介助式 ミキ


ノーパンクタイヤの
スタンダード車いす



屋内	A B C D E	屋内	A B C D E
屋外	A B C D E	屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整



ノーパンク
タイヤ

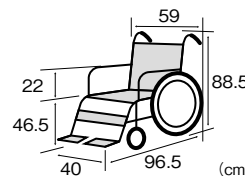

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：27cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	2,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	200 円/月
ご利用負担額 (2割)	400 円/月

非課税

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	59 cm	46.5 cm	11.5 kg

商品コード	TAISコード
728455	00122-000452

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒


幅狭タイプ

スキット2 SKT-2 介助式 ミキ

超コンパクトな介助用車いす
スキットと押せて移動できます



屋内	A B C D E	屋内	A B C D E
屋外	A B C D E	屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整

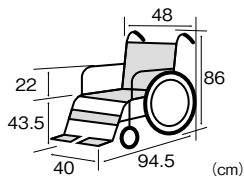

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：20cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	5,500 円/月
ご利用負担額 (1割)	550 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,100 円/月

非課税

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	48 cm	43.5 cm	12.7 kg

商品コード	TAISコード
728405	00122-000320

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒


軽量タイプ

エアリアル MW-SL2 介助式 松永製作所

持ち運びが楽な
アルミ製超軽量タイプ



屋内	A B C D E	屋内	A B C D E
屋外	A B C D E	屋外	A B C D E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整

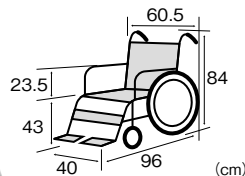

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：33.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

レンタル価格	5,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	500 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,000 円/月

非課税

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	60.5 cm	43 cm	10 kg

商品コード	TAISコード
728330	00066-000181

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガード受け金具、延長棒

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

購入品(排泄)

購入品(入浴)

軽量タイプ

TH-2SB


介助式

日進医療器

軽量かつコンパクトな
介助用車いす

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

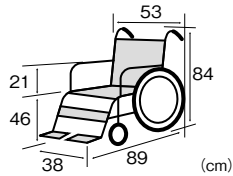

- 前輪：5インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：24cm
- シート奥行：37cm
- 最大使用者体重：75kg



座幅	全幅	前座高	重量
38 cm	53 cm	46 cm	9.8 kg

商品コード	TAISコード
728260	00175-000113

レンタル 価格	5,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	550 円/月
ご利用 負担額 (2割)	1,100 円/月

非課税

軽量タイプ／幅狭タイプ

NEXT CORE (介助) NEXT-21B

介助式

松永製作所


次世代の標準型車椅子



- 屋内でも屋外でも使いやすい
スリム&軽量車いす
- 3次元(3D)で姿勢を整える！
「立体スリングシート」

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

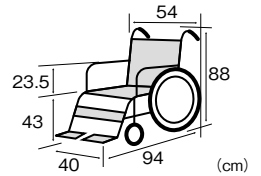

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：28cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	54 cm	43 cm	10.8 kg

商品コード	TAISコード
728480	00066-000316

レンタル 価格	4,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	400 円/月
ご利用 負担額 (2割)	800 円/月

非課税

●オプション…後方ガードル受け金具、杖入れ、延長棒

軽量タイプ

NAH-L7


介助式

日進医療器

7kg台を実現した
超々軽量の介助式車いす

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

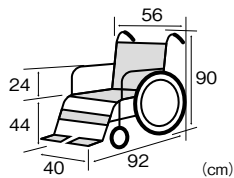

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg



座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	44 cm	7.8 kg

商品コード	TAISコード
728220	00175-000169

レンタル 価格	6,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	600 円/月
ご利用 負担額 (2割)	1,200 円/月

非課税

軽量タイプ

軽7W NAH-L7W (介助)


介助式

日進医療器

とにかく超軽量
安全移乗の
スイングアウト・ハネアゲ付

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

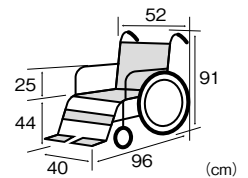

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：25cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg



※シートベルト付き

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	52 cm	44 cm	10.2 kg

商品コード	TAISコード
728465	00175-000255

レンタル 価格	7,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	700 円/月
ご利用 負担額 (2割)	1,400 円/月

非課税


標準タイプ

WAVIT+ WAP16-40S 介助式 カワムラサイクル

前ズレしにくい独自の曲線フレーム
～つまむレバーから握るレバーへ～



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

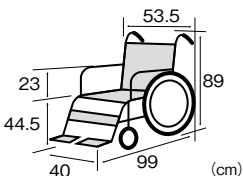

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーバンク
タイヤ

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	53.5 cm	44.5 cm	12.8 kg

商品コード TAISコード
728495 00160-000243

●オプション…WAVIT用延長プレーキ

レンタル 価格	5,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	550 円/月
負担額 (2割)	1,100 円/月

非課税


標準タイプ

AR-600 介助式 松永製作所

耐荷重 100kg
移乗も楽な多機能型



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

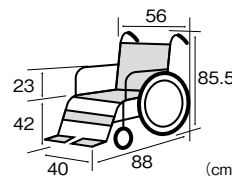

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：27cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	42 cm	15.2 kg

商品コード TAISコード
728025 00066-000185

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、後方ガードル受け金具、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

レンタル 価格	5,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	550 円/月
負担額 (2割)	1,100 円/月

非課税


低床タイプ

エアリアル MW-SL6 介助式 松永製作所

足こぎやクッション併用可の
超低床・軽量



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

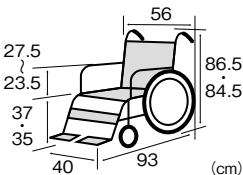

- 前輪：5インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：33cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	35-37 cm	11.8 kg

商品コード TAISコード
728350 00066-000238

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガードル受け金具、延長棒

レンタル 価格	6,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	600 円/月
負担額 (2割)	1,200 円/月

非課税


標準タイプ

ラクーネ3 LK-3 介助式 ミキ

身体を持ち上げなくても
横からの移乗が簡単にでき、
ベッド等への移乗負担を軽減



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

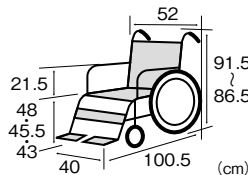

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：25cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高(固定)	重量
40 cm	52 cm	43-45.5-48 cm	15 kg

商品コード TAISコード
728475 00122-000486

レンタル 価格	5,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	550 円/月
負担額 (2割)	1,100 円/月

非課税


簡易モジュールタイプ

NA-3DX (介助) 介助式 日進医療器

多彩な調整機能
拭き取りやすい
ウレタンレザーシートも人気です



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

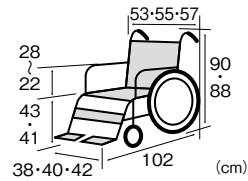

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



座幅(固定)	全幅	前座高	重量
38-40-42 cm	53-55-57 cm	41-43 cm	14.6 kg

座幅	商品コード	TAISコード
38cm幅	726337	00175-000280
40cm幅	726336	00175-000280
42cm幅	726338	00175-000280

レンタル価格	6,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	600 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,200 円/月

●オプション…延長棒 非課税


簡易モジュールタイプ

ネクストコア・アジャスト NEXT-61B (介助) 介助式 松永製作所

肘掛・座面・
フットサポート調整機能で
姿勢をサポートする
モジュールタイプ



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

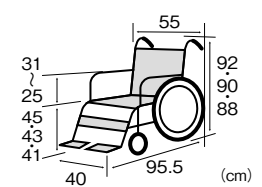

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg



座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	55 cm	41-43-45 cm	13.6 kg

商品コード	TAISコード
728510	00066-000321

レンタル価格	5,500 円/月
ご利用負担額 (1割)	550 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,100 円/月

●オプション…後方ガートル受け金具、杖入れ、延長棒 非課税


6輪車タイプ

スキット6輪 SKT-6 介助式 ミキ

小回り抜群な介助用6輪車で
機能満載
65cm幅の廊下を曲がれます



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

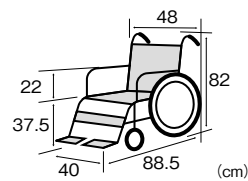

- 前輪：4インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：24cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg



ノーバンク
タイヤ

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	48 cm	37.5 cm	14.7 kg

商品コード	TAISコード
728410	00122-000375

●オプション…スマートヘッドサポート

レンタル価格	6,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	600 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,200 円/月

非課税


モジュールタイプ

EX-M3 (介助) 介助式 日進医療器

幅広い寸法に対応可能
自分だけのぴったり寸法の
車いすを!



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

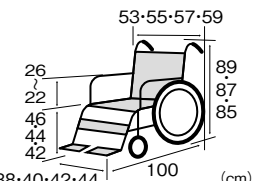

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：36cm
- シート奥行：35・40cm
- 最大使用者体重：100kg



座幅(調整)	全幅	前座高	重量
38-40-42-44 cm	53-55-57-59 cm	42-44-46 cm	15 kg

商品コード	TAISコード
728435	00175-000278

●オプション…延長棒

レンタル価格	8,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	800 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,600 円/月

非課税

ティルト


SKT-7 ティルト式

ミニ

全幅48cmのティルト式車いす



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				

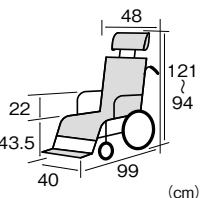

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	48 cm	43.5 cm	19 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~30°	—	92 cm	

レンタル価格	7,500 円/月
ご利用 (1割) 負担額 (2割)	750 円/月 / 1,500 円/月

商品コード TAISコード
728440 00122-000433

非課税

●オプション…延長棒

リクライニング/ティルト


マイチルト・コンパクト3D MH-CR3D リクライニング・ティルト式

松永製作所

折りたたみ可能で全幅53cmとスリムなティルト&リクライニング車いす 側彎にも対応可能な3Dシート



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				

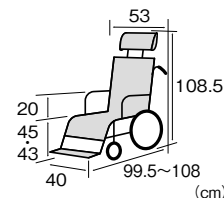

- 前輪：6インチ
- 後輪：12インチ
- 折りたたみ幅：32.5cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	53 cm	43-45 cm	24.5 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~30°	90~125°	108.5 cm	

レンタル価格	7,500 円/月
ご利用 (1割) 負担額 (2割)	750 円/月 / 1,500 円/月

商品コード TAISコード
730205 00066-000307

非課税

●オプション…S&Eユニット、延長棒


リクライニング/ティルト

MH-4RE (エレベーター付) リクライニング・ティルト式 松永製作所

座位を安定させる
ティルト&リクライニング



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				

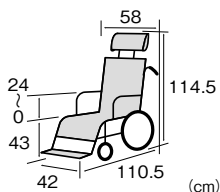

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
42 cm	58 cm	43 cm	23.4 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~30°	90~125°	107 cm	

レンタル価格	8,000 円/月
ご利用 (1割) 負担額 (2割)	800 円/月 / 1,600 円/月

商品コード TAISコード
730120 MATSUNAGAS-MH-4RE

非課税

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト

リクライニング/ティルト


エリーゼ FR-31TR リクライニング・ティルト式

松永製作所

横動きできる
フルリク&ティルトタイプ



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				

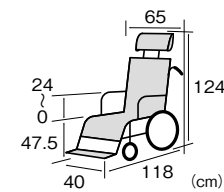

- 前輪：6インチ
- 後輪：12インチ
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

※ビニールレザー仕様

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	65 cm	47.5 cm	36.5 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~30°	100~175°	94.4 cm	

レンタル価格	15,000 円/月
ご利用 (1割) 負担額 (2割)	1,500 円/月 / 3,000 円/月

商品コード TAISコード
730045 00066-000251

非課税


リクライニング/ティルト

KXL16-42 リクライニング・ティルト式 カワムラサイクル

簡単操作のティルト&リクライニング
座位保持抜群



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				

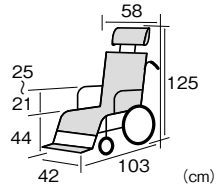

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：58cm
- シート奥行：39cm
- 最大使用者体重：100kg

※エレベーターユニットもご用意できます。

座幅	全幅	前座高	重量
42 cm	58 cm	44 cm	20.5 kg

ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ
0~20°	90~120°	101.5~118cm

商品コード	JANコード
—	4514133006762

●オプション…S&Eユニット

レンタル価格	7,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	700 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,400 円/月

非課税


ティルト

座王 NAH-F5 ティルト式 日進医療器

車いすが生活を変える
座り心地の最高峰、
座王シリーズのティルト式介助型



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				

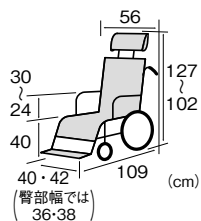

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：33cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40-42 cm	56 cm	40 cm	20 kg

ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ
-4~30°	—	—

商品コード	TAISコード
730175	00175-000304

●オプション…延長棒

レンタル価格	7,500 円/月
ご利用負担額 (1割)	750 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,500 円/月

非課税


リクライニング/ティルト

オアシス (介助) OS-12TRSP ティルト&リクライニング運動式 松永製作所

円背の利用者にも対応可能な
ティルト&リクライニング



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				

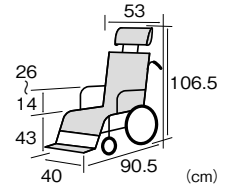

- 前輪：6インチ
- 後輪：12インチ
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：35cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	53 cm	43 cm	22.7 kg

ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ
0~25°	90~115°	—

商品コード	TAISコード
730165	00066-000296

●オプション…S&Eユニット

レンタル価格	7,500 円/月
ご利用負担額 (1割)	750 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,500 円/月

非課税


リクライニング

フルリクライニング1型 リクライニング式 松永製作所

長時間使用しても疲れにくい
モケット使用の車いす



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				

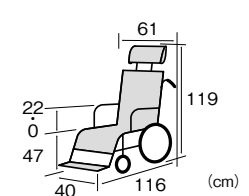

- 前輪：7インチ
- 後輪：12インチ
- シート奥行：45cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	61 cm	47 cm	24 kg

ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ
—	90~150°	—

商品コード	TAISコード
730060	00066-000004


レンタル価格	8,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	800 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,600 円/月

非課税

電動アシスト

アシストホイールライト 電動アシスト ナブテスコ

ダントツの“軽量”で
気軽にご利用できる
介助用電動アシスト車いす

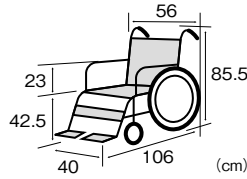

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：33.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg
- 走行距離：7km (約2時間)
- 充電時間：約130分

実用登坂
角度 **10°**

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	42.5 cm	16.9 kg

商品コード TAISコード
726265 00025-000023


レンタル価格 **15,000** 円/月
ご利用負担額 (1割) **1,500** 円/月
(2割) **3,000** 円/月

商品コード TAISコード
732155 MATSUNAGAS-MY-1JWX

電動

MY-1JWX 電動 松永製作所

高性能でコンパクトな
電動車いす

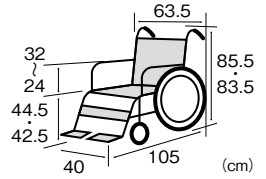

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：37cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg
- 速度範囲：1.7～4.5km/h
- 走行距離：15km
- 充電時間：2～3h

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	63.5 cm	42.5-44.5 cm	31.8 kg

商品コード TAISコード
732155 MATSUNAGAS-MY-1JWX

レンタル価格 **23,000** 円/月
ご利用負担額 (1割) **2,300** 円/月
(2割) **4,600** 円/月


商品コード TAISコード
732155 MATSUNAGAS-MY-1JWX

●オプション…延長棒

電動カート

セニアカー(四輪) ET-4F 電動カート スズキ

カンタン便利
楽しい毎日

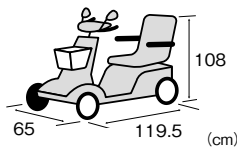

- 速度範囲：2.0～6.0km/h
- 走行距離：33km
- 充電時間：0～12h

実用登坂	段差乗越え	溝乗越え	耐荷重	重量
角度 10°	高さ 7.5 cm	幅 10 cm	100 kg	98 kg


商品コード TAISコード
— 00152-000013

レンタル価格 **23,000** 円/月
ご利用負担額 (1割) **2,300** 円/月
(2割) **4,600** 円/月

電動カート

セニアカー(四輪) ET4D7 電動カート スズキ

大型バスケットと
音声案内装備のセニアカー

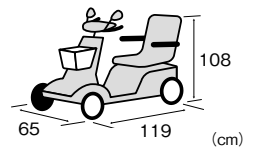

- 速度範囲：2.0～6.0km/h
- 走行距離：33km
- 充電時間：0～12h

実用登坂	段差乗越え	溝乗越え	耐荷重	重量
角度 10°	高さ 7.5 cm	幅 10 cm	100 kg	100 kg

商品コード TAISコード
— 00152-000022

レンタル価格 **23,000** 円/月
ご利用負担額 (1割) **2,300** 円/月
(2割) **4,600** 円/月

電動車いすに関わる法令について

電動車いすが歩行車と扱われるためには、道路交通法施工規則上の車体の大きさ、速度基準を満たす必要があります。


- 全長120cm、全幅70cm、全高109cmの基準内である必要があります。
- 本カタログに掲載している電動車いす本体はすべて基準値以内ですが、杖立て等の付属品を取り付けることにより基準値を超える場合があります。
- 基準値を超える場合でも、利用者または利用者から依頼を受けた人が利用者の住所を管轄する警察署長に確認申請をして、身体的状況等によりやむを得ないと判断されて確認証の交付を受けた場合には、歩行車の扱いとなります。なお利用者は確認証を携帯する必要があります。
- 時速が6km以内である必要があります。

電動カート

遊歩スキップ SH01 電動カート セリオ

コンパクトで超低速走行も可能

- 实用登坂角度 **10°**
- 段差乗越え高さ **8** cm
- 溝乗越え幅 **12** cm
- 耐荷重 **75** kg
- 重量 **89** kg

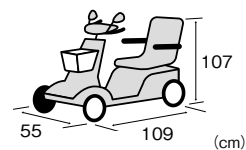

- 速度範囲：0.5～6.0km/h
- 走行距離：23km
- 充電時間：11h

レンタル価格 **20,000** 円/月
 ご利用 (1割) **2,000** 円/月
 負担額 (2割) **4,000** 円/月

非課税


商品コード	TAISコード
—	00020-000036

電動カート

遊歩フレンド SBT400 電動カート セリオ

やさしい音声案内付

- 实用登坂角度 **10°**
- 段差乗越え高さ **9** cm
- 溝乗越え幅 **12** cm
- 耐荷重 **100** kg
- 重量 **104** kg

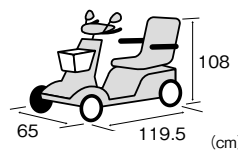

- 速度範囲：2.0～6.0km/h
- 走行距離：29km
- 充電時間：11～13h

レンタル価格 **20,000** 円/月
 ご利用 (1割) **2,000** 円/月
 負担額 (2割) **4,000** 円/月

非課税


商品コード	TAISコード
—	00020-000035

電動カート

遊歩パートナー SBT40 電動カート セリオ

長距離移動も安心の多機能タイプ

- 实用登坂角度 **10°**
- 段差乗越え高さ **8** cm
- 溝乗越え幅 **12** cm
- 耐荷重 **100** kg
- 重量 **80** kg

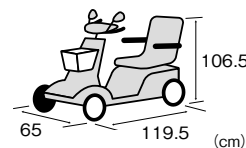

- 速度範囲：0.5～6.0km/h
- 走行距離：29km
- 充電時間：11h

レンタル価格 **23,000** 円/月
 ご利用 (1割) **2,300** 円/月
 負担額 (2割) **4,600** 円/月

非課税

商品コード	TAISコード
—	00020-000034

電動カート付属品

ステッキホルダー セリオ

商品コード	TAISコード
—	00228-000017



レンタル価格 **1,000** 円/月
 ご利用 (1割) **100** 円/月
 負担額 (2割) **200** 円/月

リアバスケット セリオ

商品コード	TAISコード
—	00020-000041



レンタル価格 **1,000** 円/月
 ご利用 (1割) **100** 円/月
 負担額 (2割) **200** 円/月

車いすオプション

※ 車いすオプションは下記車いすオプション適合表をご覧ください。

S&E ユニット

松永製作所



商品コード	TAISコード
990537	00066-000297

レンタル価格 **500** 円/月
 ご利用 (1割) **50** 円/月
 負担額 (2割) **100** 円/月

テーブル マジック式

松永製作所



商品コード	TAISコード
766080	00066-000205

レンタル価格 **1,000** 円/月
 ご利用 (1割) **100** 円/月
 負担額 (2割) **200** 円/月

スマートヘッドサポート

ミキ



商品コード	TAISコード
766075	00122-000461

レンタル価格 **1,000** 円/月
 ご利用 (1割) **100** 円/月
 負担額 (2割) **200** 円/月

ワンタッチプラスチックベルト

松永製作所



商品コード	TAISコード
766005	00066-000201

レンタル価格 — 円/月
 ご利用 (1割) — 円/月
 負担額 (2割) — 円/月

点滴棒

ミキ



タイプ	商品コード	TAISコード
固定タイプ	—	00122-000215
高さ調節	—	00122-000427

レンタル価格 **1,000** 円/月
 ご利用 (1割) **100** 円/月
 負担額 (2割) **200** 円/月

ポンベ架(跳ね上げ用)

松永製作所



商品コード	TAISコード
766040	00066-000261

レンタル価格 **1,000** 円/月
 ご利用 (1割) **100** 円/月
 負担額 (2割) **200** 円/月

背延長

カフムサイクル



タイプ	商品コード	TAISコード
枕付き	—	—
枕なし	—	—

レンタル価格 **1,000** 円/月
 ご利用 (1割) **100** 円/月
 負担額 (2割) **200** 円/月

延長棒 (+15cm)

松永製作所



商品コード	TAISコード
765510	00066-000298

レンタル価格 — 円/月
 ご利用 (1割) — 円/月
 負担額 (2割) — 円/月

延長棒 (+10cm)

ミキ



商品コード	TAISコード
765645	00122-000426

レンタル価格 — 円/月
 ご利用 (1割) — 円/月
 負担額 (2割) — 円/月

延長棒 (+10cm)

カフムサイクル



商品コード	TAISコード
766100	00160-000170

レンタル価格 — 円/月
 ご利用 (1割) — 円/月
 負担額 (2割) — 円/月

延長棒 (+16cm)

日進医療器



商品コード	TAISコード
765605	00175-000285

レンタル価格 — 円/月
 ご利用 (1割) — 円/月
 負担額 (2割) — 円/月

標準タイプ

MPN-43JD

自走式

ミキ

スタンダードモデル



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート		
フット・レッグサポート	着脱		フット・レッグサポート		
バックサポート	張り調整		バックサポート		
			座シート		
			奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：33.5cm
- シート奥行：40cm
- 重量：13kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	2,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	200	円/月
ご利用負担額 (2割)	400	円/月

非課税

商品コード	TAISコード
—	00122-000324

●オプション…延長ブレーキ

軽量タイプ

ウルトラ NA-U1

自走式

日進医療器



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート		
フット・レッグサポート	着脱		フット・レッグサポート		
バックサポート	張り調整		バックサポート		
			座シート		
			奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：25インチ
- 折り畳み幅：30cm
- シート奥行：38cm
- 重量：11.9kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	4,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	400	円/月
ご利用負担額 (2割)	800	円/月

非課税

商品コード	TAISコード
—	00175-000318

●オプション…延長ブレーキ

簡易モジュールタイプ

MYU4-22

自走式

ミキ

座り心地、こぎやすさを追求しました



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート		
フット・レッグサポート	着脱		フット・レッグサポート		
バックサポート	張り調整		バックサポート		
			座シート		
			奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：34.5cm
- シート奥行：40cm
- 重量：16.2kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	6,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	600	円/月
ご利用負担額 (2割)	1,200	円/月

非課税

座幅	商品コード	TAISコード
38cm幅	726582	00122-000302
40cm幅	726584	00122-000302
42cm幅	726588	00122-000302

●オプション…延長ブレーキ

標準タイプ

MPCN-46JD

介助式

ミキ

座面が高いため介護負担軽減



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート		
フット・レッグサポート	着脱		フット・レッグサポート		
バックサポート	張り調整		バックサポート		
			座シート		
			奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：25cm
- シート奥行：40cm
- 重量：11.4kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	2,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	200	円/月
ご利用負担額 (2割)	400	円/月

非課税

商品コード	TAISコード
—	00122-000332

●オプション…延長ブレーキ

軽量タイプ

ウルトラ NAH-U1

介助式

日進医療器



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート		
フット・レッグサポート	着脱		フット・レッグサポート		
バックサポート	張り調整		バックサポート		
			座シート		
			奥行調整		

そのまま座りだけの快適バックサポート

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 重量：10.5kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	4,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	400	円/月
ご利用負担額 (2割)	800	円/月

非課税

商品コード	TAISコード
—	00175-000319

●オプション…延長ブレーキ

簡易モジュールタイプ

MYU4-16

介助式

ミキ

馴染みやすいデザインで機能充実



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート		
フット・レッグサポート	着脱		フット・レッグサポート		
バックサポート	張り調整		バックサポート		
			座シート		
			奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：32.5cm
- シート奥行：40cm
- 重量：14.6kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	6,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	600	円/月
ご利用負担額 (2割)	1,200	円/月

非課税

商品コード	TAISコード
728385	00122-000303

●オプション…延長ブレーキ

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

購入品「排泄」

購入品「入浴」

軽量タイプ

スキット1 SKT-1 介助式 ミキ

軽量かつコンパクトで
狭い場所をスイスイ移動



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート		
	跳ね上げ				
フットレッグサポート	着脱		フットレッグサポート		
	スイングアウト				
バックサポート	張り調整		座シート		
			奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：20cm
- シート奥行：40cm
- 重量：9.9kg
- 最大使用者体重：100kg

商品コード	TAISコード
—	00122-000319
レンタル価格	5,500円/月
ご利用負担額 (1割)	550円/月
(2割)	1,100円/月

●オプション…延長ブレーキ

非課税

モジュールタイプ

SKT-1000 自走式 ミキ

機能充実のモジュール車いす
現行型より20mmスリムに



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート		
	跳ね上げ				
フットレッグサポート	着脱		フットレッグサポート		
	スイングアウト				
バックサポート	張り調整		座シート		
			奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：32cm
- シート奥行：40cm
- 重量：17.9kg
- 最大使用者体重：100kg

商品コード	TAISコード
—	00122-000524
レンタル価格	6,000円/月
ご利用負担額 (1割)	600円/月
(2割)	1,200円/月

●オプション…延長ブレーキ

非課税

特殊タイプ

ノンバックブレーキ車いす 自走式 ミキ

ブレーキのかけ忘れを防いで
未然に転倒を防止



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート		
	跳ね上げ				
フットレッグサポート	着脱		フットレッグサポート		
	スイングアウト				
バックサポート	張り調整		座シート		
			奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：38cm
- シート奥行：40cm
- 重量：16.6kg
- 最大使用者体重：100kg

商品コード	TAISコード
—	00122-000528
レンタル価格	5,000円/月
ご利用負担額 (1割)	500円/月
(2割)	1,000円/月

●オプション…延長ブレーキ

非課税

軽量タイプ

スキット3 SKT-3 自走式 ミキ

室内の狭い場所をスイスイ
移動できるスタンダードタイプ



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート		
	跳ね上げ				
フットレッグサポート	着脱		フットレッグサポート		
	スイングアウト				
バックサポート	張り調整		座シート		
			奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：28.5cm
- シート奥行：40cm
- 重量：11.5kg
- 最大使用者体重：100kg

商品コード	TAISコード
—	00122-000410
レンタル価格	5,500円/月
ご利用負担額 (1割)	550円/月
(2割)	1,100円/月

●オプション…延長ブレーキ

非課税

モジュールタイプ

SKT-2000 介助式 ミキ

機能充実のモジュール車いす
お尻の前滑りを防ぐパット付
フッショ仕様



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート		
	跳ね上げ				
フットレッグサポート	着脱		フットレッグサポート		
	スイングアウト				
バックサポート	張り調整		座シート		
			奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：27cm
- シート奥行：40cm
- 重量：16.3kg
- 最大使用者体重：100kg

商品コード	TAISコード
—	00122-000525
レンタル価格	6,000円/月
ご利用負担額 (1割)	600円/月
(2割)	1,200円/月

●オプション…延長ブレーキ

非課税

特殊タイプ

ラクーン2 LK-2 自走式 ミキ

ベッド等への移乗負担を
軽減します



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整		アームサポート		
	跳ね上げ				
フットレッグサポート	着脱		フットレッグサポート		
	スイングアウト				
バックサポート	張り調整		座シート		
			奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：38.5cm
- シート奥行：40cm
- 重量：20.5kg
- 最大使用者体重：100kg

商品コード	TAISコード
—	00122-000477
レンタル価格	5,500円/月
ご利用負担額 (1割)	550円/月
(2割)	1,100円/月

●オプション…延長ブレーキ

非課税