


車いす用クッションの選び方


利用者状態別選定ポイント

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E
このマークを目安に選べます。


Bさん
屋外の車いす使用時などに衝撃を吸収するために除圧系のクッションが必要です。




Cさん
座り直しは可能な方ですが、骨盤を安定させるために姿勢保持用のクッションの使用を検討しましょう。車いすを駆動する場合には駆動の動きを考慮したクッションが必要です。



Dさん
座り直しに努力を要する方です。圧分散は必須となります。姿勢保持は、背もたれと座面両面から考えましょう。移乗等の動きを助けるために、足が床に届くようにクッションを含めた座面高の考慮が必要です。




Eさん
座り直しができない方です。車いすのタイプにもよりますが、圧分散、姿勢保持を背もたれと座面の両面から考えましょう。麻痺や変形があれば、クッション側にも調整機能のあるものがよいでしょう。




「車いす」で快適に過ごすために

車いすに快適に「座る」ためには、圧分散・姿勢保持、「動く・移動する」ためには、動きを助けるという要素を考慮することが必要です。使用する車いすの座面によっては、必要とされる要素を満たせていない場合がございますので、車いす用クッションの導入をご検討ください。

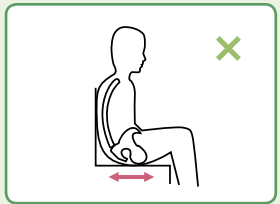

- クッションの目的** ①圧分散 ②姿勢保持 ③動きを助ける
- クッションの選定** 上記の使用目的すべてを満たすような万能のクッションはありません。何を優先すべきか? 考えて選定することが大切です。また、使用する車いすとの兼ね合いも考慮に入れましょう。

※クッションは「座布団」では代用できません。専用のものを使用しましょう。

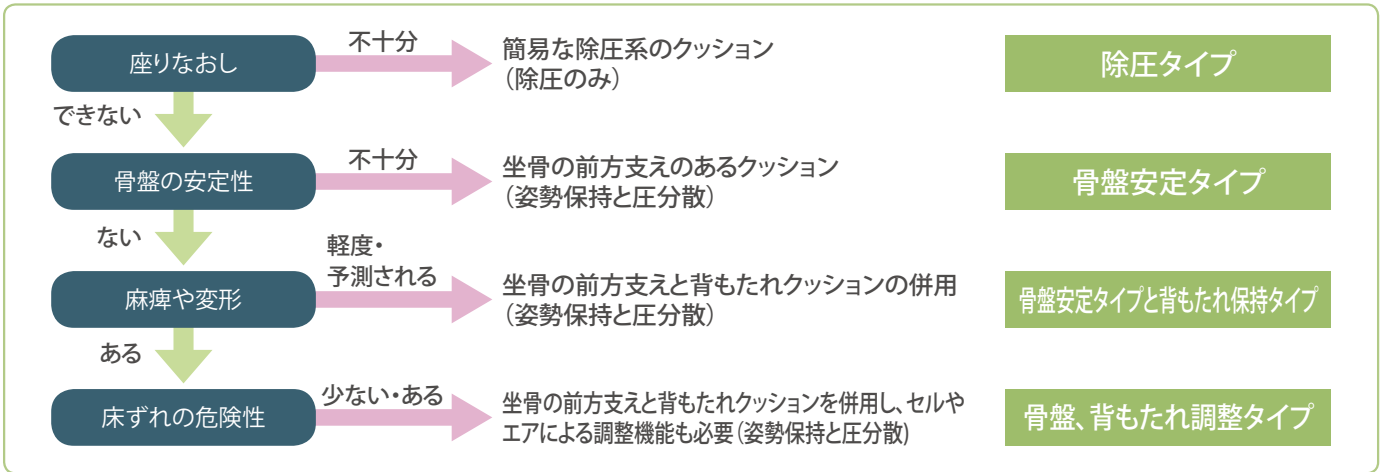

※上記はあくまで目安です。身体の状態、使用目的、使用する車いすによって検討が必要です。専門家にご相談ください。

フォーム
アルファプラクッション KC-WP4040 タイカ

Point1 体圧分散性能
しっかり支える。ウレタンフォームの特殊スリットとゲルのかで広く、低圧に。

Point2 座位保持機能
お尻になじむ、だから抜群の座り心地に。

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

厚さ 6cm 重量 0.6kg



商品コード TAISコード
760005 00563-000017

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質 (中身): αGEL、ウレタンフォーム

レンタル価格 **2,000** 円/月
ご利用負担額 (1割) **200** 円/月
(2割) **400** 円/月

フォーム
リフレア 日進医療器

適度な通気性でムレにくい
正しい姿勢を保ってズレを低減
体をしっかり支えて体圧を分散

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

厚さ 7.5cm 重量 0.5kg



無膜処理されたウレタンフォーム

商品コード TAISコード
762080 00175-000223

●サイズ: 幅39×奥行39cm
●材質 (中身): 高通気・低反発ウレタンフォーム

レンタル価格 **2,000** 円/月
ご利用負担額 (1割) **200** 円/月
(2割) **400** 円/月

ジェル

ベスポジェルクッション CK-375

ケーブ

前後で厚みを変えることで
沈み込みの度合いが異なり
前ずれ防止や足こぎサポートにも対応



厚さ 6.5cm 重量 1.6kg



商品コード 762085 TAISコード 00206-000072

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：ポリウレタンジェル、ウレタンフォーム

レンタル価格 2,000円/月
ご利用負担額 (1割) 200円/月 (2割) 400円/月

ジェル

アウルREHA レギュラー OWL21-BK1-4040

加地

薄さ4cmのフラットな
スタンダードタイプ!
体圧分散性と薄さ・
足つき性を求める方に



厚さ 4cm 重量 1.2kg



商品コード 760025 TAISコード 00540-000028

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム

レンタル価格 2,000円/月
ご利用負担額 (1割) 200円/月 (2割) 400円/月

ジェル

リバティクッション

ラックヘルスケア

動きやすさと安全性を追求
身体の形状に合わせて柔軟になじみ、
姿勢をサポートします



厚さ 4cm 重量 0.6kg



商品コード 762095 TAISコード 00245-000078

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：強化ナイロン、シリコンゲル

レンタル価格 2,000円/月
ご利用負担額 (1割) 200円/月 (2割) 400円/月


在庫限定

ジェル

アクションパッド # 9000

アクションジャパン

厚さ2.5cmでも
底づきしないで圧力を分散

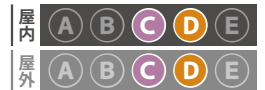

厚さ 2.5cm 重量 4.5kg



商品コード 760060 TAISコード 00428-000005

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：アクトドライポリマー

レンタル価格 2,000円/月
ご利用負担額 (1割) 200円/月 (2割) 400円/月

ジェル

アウル40 プラスレザー OWL40P-L

加地

EXGELが体を優しくサポート
アウル形状が身体に
心地よくフィット



厚さ 5.5cm 重量 1.1kg



商品コード 760019 TAISコード 00540-000013

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：エクスジェル（合成ゴム）、ウレタンフォーム

レンタル価格 2,000円/月
ご利用負担額 (1割) 200円/月 (2割) 400円/月

エア+フォーム

バリライトソロストレータス 56630

ユーキ・トレーディング

座位保持と
座り心地の良さを追求



厚さ 7.5cm 重量 0.75kg



商品コード 762060 TAISコード 00468-000002

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：IFD フォーム

レンタル価格 2,000円/月
ご利用負担額 (1割) 200円/月 (2割) 400円/月

車いす用クッション

エア+フォーム

リフレックス

ユーキ・トレーディング

クッションに座ると自動的に空気が
抜け、お尻の形に合わせます

座クッションの特長

バルブ内蔵型エアークッション



厚さ 7.5cm 重量 0.72kg



商品コード 762065 TAISコード 00468-000034

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): ポリウレタン、ポリエステル

レンタル価格 2,000円/月
ご利用負担額 (1割) 200円/月 (2割) 400円/月

エア

ロホクッション ロータイプ

アビリティーズ・ケアネット

ご自分で座位のとれる方に最適



厚さ 5cm 重量 0.85kg



●この商品には、カバーがつかます。

商品コード 762000 TAISコード 00249-000049

●サイズ: 幅38×奥行38cm
●材質(中身): 耐失禁ネオプレンラバー

レンタル価格 5,000円/月
ご利用負担額 (1割) 500円/月 (2割) 1,000円/月

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器 自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

フォーム

FG-アジャスト 標準セット

アイ・ソネックス

大腿パット着脱式で足駆動に便利

座クッションの特長

足駆動する方は、大腿パットを
はずすと前座を低くできます。



背/厚さ 2cm 背/重量 0.69kg

座/厚さ 8.5cm 座/重量 1.3kg



商品コード 760045 TAISコード 00149-000008

座 ●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): ポリエチレンフォーム、
低反発性高密度特殊ウレタン
背 ●サイズ: 幅39.5×背高さ41cm
●材質(中身): ポリエチレンフォーム

レンタル価格 3,000円/月
ご利用負担額 (1割) 300円/月 (2割) 600円/月

ジェル

アウルサポートセット OWLS-SO1B01

加地

EXGELが身体をやさしく支え、
座位バランスのサポート力をアップ



背/厚さ 12cm 背/重量 1.4kg

座/厚さ 前7cm・後5cm 座/重量 1.2kg



●この商品には、カバーがつかます。

商品コード 760015 TAISコード 00540-000017

座 ●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): エクスジェル、ウレタンフォーム
背 ●サイズ: 幅48×背高さ36.5cm
●材質(中身): エクスジェル、ウレタンフォーム

レンタル価格 3,000円/月
ご利用負担額 (1割) 300円/月 (2割) 600円/月

ジェル

エクスジェル サポートセット ASK-00

加地

姿勢を固定から
心地よい安定へ



座/厚さ 前10cm・後7cm 座/重量 1.3kg

背/厚さ 11.5cm 背/重量 0.9kg



商品コード 760040 TAISコード 00540-000006

座 ●サイズ: 幅40×奥行41.5cm
●材質(中身): エクスジェル、ウレタンフォーム、
発泡ポリエチレン
背 ●サイズ: 幅46×背高さ37cm
●材質(中身): エクスジェル、ウレタンフォーム

レンタル価格 3,000円/月
ご利用負担額 (1割) 300円/月 (2割) 600円/月

在庫限定

ジェル

Gel-Tクッション CK-346

ケーブ

前ズレ、横ズレを防ぎ、
流動性のゲルが瞬間的なズレに対応
車いす上で可動する機会の多い方に



厚さ 5cm 重量 2.5kg



商品コード 760000 TAISコード 00206-000006

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): ウレタンフォーム、
ナトリウムアクリル樹脂、
流動ジェル

レンタル価格 2,000円/月
ご利用負担額 (1割) 200円/月 (2割) 400円/月